



急救用止血帶


Hema-T™ 是一款專為手臂或腿部開放性傷口出血情況設計的止血帶，其用途在於防止危及生命的失血。

Hema-T™ 可由使用者自行綁紮，亦可由照護者協助綁紮。操作過程輕鬆簡易，僅需數秒鐘，無需任何專業知識。

請注意，若需將 **Hema-T™** 用於腿部時需先脫鞋，但不需要脫去褲子，用於上肢時則無需捲起衣袖。

若肢體呈不穩定狀態（骨折），需由兩名照護者協作：一人施以軸向牽引，另一人則綁上止血帶。每個產品包裝內附有一張黃色貼紙，用以記錄開始使用時間並將其貼於患者的額頭或明顯部位。

Hema-T™ 可維持在肢體上長達兩小時。若需要更長的使用時間，可將 **Hema-T™** 往下捲以放鬆止血帶，同時對出血傷口直接加壓避免再次出血。10分鐘後，即可重新將 **Hema-T™** 捲至出血點上方。

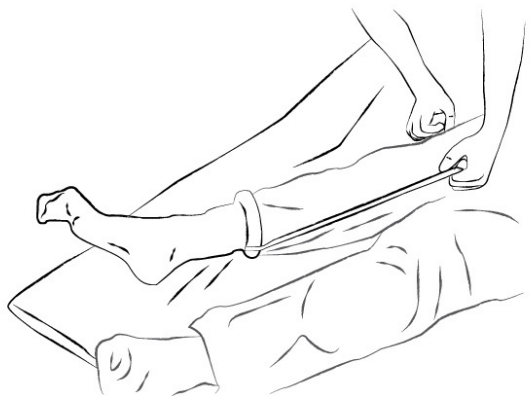

www.Hema-T.com

台灣總代理 茂信股份有限公司 02-2771-0569 www.mutualong.com.tw